

捷大口咽氣道管（未滅菌） 中文說明書

衛部醫器製壹字第 010037 號

用途：置入口腔用以推開舌頭及抬起舌頭根部，以維持呼吸道通暢。

深入喉部可能引起強烈喉反射動作。

禁忌症：對 PVC 塑膠有過敏史者不宜使用。

警告、注意事項、使用限制：須由專業醫療人員使用。

不得重複使用以免發生交叉感染。使用後作為醫療廢棄物處理。

型號：J-Berman,

材質：PVC 塑膠。

尺寸：3#適用於身高 140-155cm,

4#適用於身高 150-170cm,

5#適用於身高 165-200cm.

儲存運送條件：不可曝曬，淋雨，保持包裝完整，乾燥，不可污染。

效期：無限制。

使用前的準備：確定包裝未受損，醫材未收污染。

滅菌狀態：未滅菌，一次性使用。

醫療器材商：捷大有限公司

醫療器材商地址：台北市中山區德惠街 60 號

製造業者名稱：廣鎬企業有限公司

製造業者地址：新宜蘭縣五結鄉利工一路二段 126 巷 8 號